

#### Confezioni in commercio

Preceasy Liquido **500 ml**  
Preceasy Polvere Opaca **1 Kg**

Preceasy Polvere Rosa Trasparente **1 Kg**

|     |             |
|-----|-------------|
| REF | COD. PREC 3 |
| REF | COD. PREC 0 |
| REF | COD. PREC 7 |

#### Prodotto ad uso professionale

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Data delle specifiche: 09/2016

EN ISO 20795-1 TYPE II, CLASS 1

#### Caratteristiche e classificazione

DEI® Lab Preceasy è una resina a freddo che offre una elevata stabilità del colore nel tempo grazie ai bassissimi coefficienti di assorbimento e ad una innovativa formulazione chimica. È molto facile da lavorare grazie alla particolare fluidità e modellabilità. È utilizzabile sia con la tecnica di zeppatura che di colaggio. DEI® Lab Preceasy è indicata anche per lavori estesi grazie ai tempi di lavorazione ottimali.

#### Composizione

Methylmethacrylate, Cross linker.

#### Dati tecnici

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Polimerizzazione:          | ca. 15 min/45°C             |
| Fase fluida:               | ca. 3 minuti                |
| Rapporto di miscelazione:  | 10:7                        |
| Durezza Vicker:            | ca. 16 Kp/mm <sup>2</sup>   |
| Resistenza alla flessione: | ca. 2500 N/mm <sup>2</sup>  |
| Assorbimento dell'acqua:   | ca. 25,7 µg/mm <sup>3</sup> |
| Solubilità dell'acqua:     | ca. 0,6 µg/mm <sup>3</sup>  |

#### Modo d'impiego

Miscelare aggiungendo la polvere al liquido in rapporto di 10:7. Per la tecnica di colatura può essere impiegata entro 3/4 minuti; dopo tale periodo può essere zeppata. Durante la fase plastica è possibile modellarla. Dopo massimo 8 minuti deve essere polimerizzata sotto pressione.



DEI® Lab  
**preceasy**  
resina per protesi autopolimerizzante  
liquido 500 ml



Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (Va)  
Tel. +39.0331.969270 - [www.deiitalia.it](http://www.deiitalia.it)

#### Indicazioni

Protesi totali, parziali, combinate, ribasature, riparazioni.

#### Tempo di lavorazione

Fase di colata: 2-3 minuti

Fase plastica: 5 minuti a temperatura ambiente (23°C)

#### Polimerizzazione

Tempo di polimerizzazione nel polimerizzatore 15 minuti sotto la pressione di 2-4 bar, ad una temperatura dell'acqua di 45°C.

#### Avvertenze

I tempi di lavorazione sono in stretta relazione con la temperatura ambiente, risulteranno più lunghi a temperature inferiori e più brevi a temperature superiori a 23°C.


Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/a prova di esplosione. In caso di contatto con la pelle (o con i capelli); togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

#### Conservazione

Conservare a temperatura compresa tra 10 e 25°C.



PERICOLO  
CONTIENE  
METACRILATO  
DI METILE

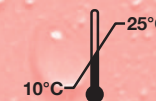

CE 0546

E/PRECL/4