

PREPARAZIONE DELL'ELEMENTO SU CUI AVVERRÀ LA CEMENTAZIONE

DENTE NATURALE



1 Mordenzare con Etching Gel



2 Pulire molto accuratamente con soluzione di bicarbonato di sodio o spray d'acqua

3 Applicare New Extra Bond One + New Extra Catalyst e fotopolimerizzare per 20 sec. (Se si utilizza Nova Resin Cement, saltare punti 1 e 3)

MONCONI METALLICI



1 Sabbiare il moncone e pulire con alcool o acetone

2 Effettuare ritenzioni con fresa diamantata

3 Applicare UniAdhesive 1 (Se si utilizza Nova Resin Cement, saltare punto 3)

CARBOCAD 3D



1 Sabbiare a 2 atm

2 Pulire con alcool etilico



3 Applicare Dream Opaque (protocollo pag. 10) (Se si utilizza Ghost Cem, non opacizzare)



4 Cementare con Simply Core Hard Mini, Ghost Cem o Nova Resin Cement e aspettare almeno 5 min. prima di svitare