

CEMENTAZIONE

FACCETTE ESTETICHE IN CERAMICA O DISILICATO



1

Sabbiare leggermente (1 atm) la faccetta o applicare Royalry (acido fluoridrico) (mordenzatura) per 3 minuti



2

Sciacquare accuratamente

3

Applicare Ceramic Prime all'interno della faccetta



4

Applicare New Extra Bond One + New Extra Catalyst

(Se si utilizza Nova Resin Cement, saltare punto 4)

5

Cementare con Simply Core Hard Mini o Nova Resin Cement o Experience Evolution Dentina Flow

6

Fotopolimerizzare per 20 sec.

