

CEMENTAZIONE

ELEMENTI E SOTTOSTRUTTURE IN DISILICATO,
FIBRA DI VETRO O COMPOSITO M.C.M.



1

Applicare Royalry (acido fluoridrico) all'interno della corona (mordenzatura) o sabbiare (3 atm) per 3 minuti



2

Sciacquare

3

Applicare Ceramic Prime

4

Cementare con Simply Core Hard Mini o Ghost Cem o Nova Resin Cement



5

Fotopolimerizzare per 30 sec.