



1 Sabbiare ad 1 atm con biossido di alluminio (90/120 micron)

2 Pulire accuratamente con alcool puro trasparente l'interno delle corone in zirconia

3 Applicare UniAdhesive 1 all'interno del manufatto protesico



4 Applicare Simply Core Hard Mini o Nova Resin Cement o Ghost Cem (vd. protocollo su bugiardino) all'interno della corona e posizionare il manufatto sul dente o sul moncone metallico

5 Per facilitare la rimozione dell'eccesso si consiglia di fare uno spot di luce di 3 secondi e di togliere il cemento con uno specillo

6 Continuare la fotopolimerizzazione: 20 secondi per lato

NB: trattandosi di cementazione adesiva si raccomanda di operare in campo asciutto