

FISSAGGIO

FACCETTE MAJOR AF COMP SU CARBONIO



1

Sabbiare la fibra di carbonio a 3 atm con biossido di alluminio (110/180 micron)

2

Pulire bene con alcool etilico

3

Bagnare la superficie interna della faccetta con monomero (EasyTemp 2)



4

Applicare Dream Opaque Universale sul carbonio (seguire il protocollo a pag. 10)



5

Preparare in 2 contenitori diversi Preceasy Rosa Opaca e EasyTemp 2 Polvere Chiara



6

Posizionare per prima la resina EasyTemp 2 all'interno delle faccette (circa 2 mm)

7

Soffiare delicatamente con un po' di aria in modo che la resina passi dallo stato liquido allo stato gommoso

8

Applicare la resina Preceasy Rosa Opaca sui colletti dei denti nella mascherina



9

Completare la zeppatura mettendo in posizione la mascherina