

# OPACIZZAZIONE

## SOTTOSTRUTTURE IN CARBONIO O METALLO



**1** Sabbiare la fibra di carbonio o il metallo con biossido di alluminio 120/160 micron (Sabbiare il carbonio a 2 ATM)

**2** Pulire la fibra di carbonio con alcool etilico 94°C



**3** Appena asciutto applicare UniAdhesive 1

**4** Dopo 2 minuti asciugare con un leggero soffio di aria non contaminata



**5** Applicare UniAdhesive 2 e fotopolimerizzare per 2 minuti

**6** Applicare Dream Opaque Wash e fotopolimerizzare per 4 minuti



**7** Applicare Dream Opaque Universale e fotopolimerizzare per 4 minuti



**8** Applicare composito DEI® experience